

PROFIL LAIT CHIRURGICAL

- Produit :** Antirouille et lubrifiant d'instruments chirurgicaux.
- Description :** Le **LAIT CHIRURGICAL** est dilué dans l'eau pour obtenir un bain servant au trempage des instruments. Toujours faire tremper les instruments chirurgicaux dans le **LAIT CHIRURGICAL** avant de les stériliser.
- Fonction :** Le **LAIT CHIRURGICAL** maintient le degré de lubrification de vos instruments et vous permet de conserver les instruments articulés au meilleur de leur condition.
- Emballage :** Bouteilles de 2 ou 4 litres.

Caractéristiques

Avantages

- Augmente la durabilité** L'usage systématique du **LAIT CHIRURGICAL** maintiendra les instruments articulés au meilleur de leur condition. Les instruments manuels resteront affûtés plus longtemps et nécessiteront moins d'entretien. Il prolonge la durée de tous les types d'instruments rotatifs, qu'il s'agisse d'acier, d'acier inoxydable, de carbure ou de diamant. Toutes les fraises opératoires, chirurgicales ou de réduction brute seront en meilleur état si vous utilisez le **LAIT CHIRURGICAL**.
- Permet la stérilisation en autoclave** L'utilisation fréquente du bain de trempage **LAIT CHIRURGICAL** n'intervient pas avec l'efficacité antimicrobienne de la stérilisation en autoclave.
- Hautement concentré** Mélanger une partie de concentré à cinq parties d'eau distillée ou d'eau du robinet pour obtenir six parties de bain de trempage.
- Efficace** Efficace dans les stérilisateurs à vapeur sèche ou chimique.
- N'endommagera pas les instruments** Contient un anticorrosif d'interface et de surface et un lubrifiant à base d'oxygène et de dioxyde de carbone ayant des propriétés nettoyantes. La solution arrête la décoloration, la rouille et la corrosion lors de la stérilisation en autoclave.
- Non toxique** Peut être manipulé sans danger.